

# Nombre Comercial Venda Elástica



[www.begut.co](http://www.begut.co)

## INDICACIONES DE USO:

- Inmovilizaciones en general, fijación de férulas.
- Empleado en la práctica clínica ortopédica y en primeros auxilios, especialmente para mantener la presión sobre una compresa, cubrir lesiones o inmovilizar un miembro entre otras

## ADVERTENCIAS:

- NO sujetarla venda demasiado porque puede detener el flujo de la sangre.
- Remover la venda al menos 2 veces al día para facilitar el flujo de sangre. Después de unos minutos será necesario envolver la venda nuevamente. Preguntar al médico si puede quitarse la venda para dormir.
- Remover la venda si presenta insensibilidad u hormigueo.
- Frotar suavemente la piel.
- Remover la venda si nota que su mano o pie se ve azul o está frío.
- Mantener una venda extra en caso de que la que está usando se ensucia o se moja.

## DISPOSICIÓN FINAL:

No Reutilizar

## CONTRAINDICACIONES:

Para usar sólo una vez

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Conservar en lugar fresco y seco.

## PRESENTACIÓN:

- Rollo: 2"x5, 3"x5, 4"x5, 5"x5, 6"x5 / Caja x 12 unidades
- Tipo: Liso y crepé (rugoso)
- Color: Piel



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Hilo de algodón y fibras sintéticas  
Manufacturado bajo ISO13485, CE y FDA.  
Vida útil: 5 años.

REGISTRO SANITARIO:  
INVIMA 2013DM-0009736

RIESGO: I

**SevenPharma** S.A.S.  
IMPORTACIONES

  [begut\\_sevenpharma](https://www.instagram.com/begut_sevenpharma)